

APSAUGINĖ KAUKĖ SU KIŠENĖLE PAPILDOMAM KEIČIAMAM FILTRUI ĮDĖTI



*KAUKĖ VIDINĖJE PUSĖJE TURI KIŠENĖLĘ PAPILDOMAM KEIČIAMAM
FILTRUI ĮKIŠTI (GALIMA NAUDOTI VIENKARTINĘ NOSINĘ, MARLĘ, VATA,
HIGIENINĮ PAKETĄ)*



Mūsų medvilninės kaukės nėra medicininės paskirties, tačiau jos puikiai tinka norint apsaugoti save nuo bereikalingo veido lietimui, patekus šalia čiaudančio žmogaus, einant į parduotuvę ar dirbant. Yra daugkartinės, skalbiamos. Kaukę dėvime tam, kad neįkvėpti prieš tai buvusių ar esamų asmenų oro lašeliniu būdu ore paskleistų virusų ir k. t. dispersijos tiesiogiai. Tuo pačiu apsaugome kitus nuo tiesiogiai iškvėpiamo savo oro.

Kaukės pagamintos iš ypač tankaus medvilnės su poliesteriu audinio. Apsauginė kaukė yra universalaus dydžio, elastinės gumos ilgis reguliuojamas užrišant paprastą mazgelį. Gumos spalva gali skirtis nuo pateiktos nuotraukoje (gali būti juodos arba baltos spalvos)

Kaukės yra daugkartinio naudojimo, skalbiamos net iki 90 laipsnių temperatūroje bei lyginamos prieš kiekvieną naudojimą. Jas galima 15 min. dezinfekuoti skalbinių džiovyklėje aukštesnėje nei 70 laipsnių temperatūroje.

Medžiaginės kaukės turi būti individualios. nesidalinkime jomis su kitais asmenimis. Kad galėtume užsitikrinti kaukės higieninę priežiūrą turėkime kelias kaukes.

Kaukę reikia užsidėti ir ją "pamiršti", susilaikyti nuo valgymo, gėrimo ir kitokių nešiojimo pertraukėlių, nes nusiėmus ją reikia keisti kita. Vienam asmeniui patariama turėti 3-4 kaukes dienas.

Panaudotas kaukes būtina išskalbti kuo aukštesnėje vandens temperatūroje ir išlyginti.

Prieš-filtrus dėti į kaukės kišenėle tik švariomis rankomis, panaudojus išimti ir išmesti į atliekas. Nusiėmus kaukę nusiplauti ir dezinfekuoti rankas.

TINKAMAI SAUGODAMIESI NUGALĖSIME VIRUSĄ ☺